



Очистка, дезинфекция, уборка

ERISAN DES



Описание:

Средство «Эрисан Дез» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, практически без запаха, хорошо смешивающуюся с водой. Содержит в качестве действующих веществ, дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС), N,N-бис (3-аминопропил) додециламин и другие компоненты.

Свойства:

«Эрисан Дез» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая полиомиелит) и грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и последующего оттаивания. По параметрам острой токсичности относится к 3-му классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии летучих компонентов и при парентеральном введении – к 4 классу малотоксичных веществ. Концентрации рабочих растворов от 0,25 до 5 %, срок годности – 14 суток.

Состав:

идецилдиметиламмония хлорид	5-15 %
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин	< 5 %
-феноксиэтанол	5-15 %
Безионные тензиды	< 5 %
Триэтаноламин	< 5 %
pH рабочего раствора	10

Применение:

Предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) любого профиля, в том числе детских стационарах и поликлиниках, отделениях родовспоможения, неонатологии, интенсивной терапии и реанимации, онкологических и ожоговых центрах. Для проведения текущей и профилактической дезинфекции, для генеральной уборки. Для дезинфекции нарочно-дыхательной аппаратуры, для дезинфекции санитарного транспорта, а также для обработки белья, предметов ухода за больными, игрушек, средств личной гигиены, столовой (с остатками и без остатков пищи) и лабораторной посуды, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, резиновых коврик и обуви, для обработки медицинских отходов перед утилизацией. Для дезинфекции изделий медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, металлов (включая стоматологические инструменты и эндоскопы), а также для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой указанных изделий ручным способом; Для предстерилизационной очистки (в т.ч. совмещенной с дезинфекцией) механизированным способом в ультразвуковых установках «Кристалл-5» и «УЗВ». Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в инструкции по применению средства.

Упакова:

500 мл, 3 л

Хранение:

3 года

